

# 作業エリアにすっきり納まる コンパクトな注射薬調製支援システム

Your Partner in Medication

**yuyama**

抗がん薬  
調製

無菌・一般  
注射薬  
調製

**NEW**

注射薬調製支援システム

**MIXING ROAD**

<ミキシングロード>

混注手順書のバーコード認証で調製開始。  
患者間違いといったリスクを回避。

薬品の取違い対策はバーコード照合。  
調製容量は重量監査で確りチェック。

調製時は常時、画像を撮影。  
エビデンスを保存し、安心。

分析時のお役立ちツールとして、  
調製結果の集計機能を搭載しています。

コンパクト  
サイズ

モニタ傾き  
調整付き



# 庫内に手順用モニタを設置。 正面を向いたまま調製作業実施。



撮像カメラ

調製手順用モニタ

電子天秤

バーコードリーダー

調製ナビのモードは5つ用意。  
調製作業者毎に最適な方法をご提供します。  
<薬品認証と画像撮影はすべてのモードで行います。>

## NEW スキップモード

薬品の一覧と採取量のみ表示。重量チェック無し、薬品照合と画像記録のみで、スピーディ、記録優先の方に最適です。

## 記録優先

## 重量なしモード

計量の工程を省き、かつシリンジのサイズ指定もないため、ナビに従って薬品認証と画像撮影を行うモードです。

## 簡易手順モード

シリンジのサイズ指定を無くしたことで、複数薬品を扱う際もまとめて薬品認証、計量、撮影を行います。手順を簡略化したモードです。

## 通常モード

シリンジのサイズまで指定してナビ。一つ一つの工程を正確に行っていきます。

## ナビ優先

## NEW フルナビモード

使用する薬品や器具、注意事項、作業プロセス一覧を表示。調製作業に不安をお持ちの場合でも一つ一つ丁寧に案内するから安心です。

調製開始前に  
モード切替。

別室ペア薬剤師による遠隔監査で一人調製対応可能。(要別端末)  
OK/NG時の監査結果コメント送信機能により、円滑なコミュニケーションを支援します。

監査者側(別室)



調製者側



薬品も調製容量も間違いないためOK!  
次の調製を行ってください。

## 仕様

型式	YS-MXRD
外形寸法	幅205mm×奥行357mm×高さ465mm
本体質量	本体のみ : 8kg
	天秤搭載時 : 12kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	100VA(MAX)
オプション	ラベルプリンタ

詳細は、弊社営業担当者までお問合せください。



製造元  
株式会社

湯山製薬所

発売元  
株式会社



大阪本社

〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号  
TEL.(06)6868-5155 FAX.(06)6868-5154

東京本社

〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号  
TEL.(03)3829-9511 FAX.(03)5611-2011

弊社WEBサイト  
はこちらから

